


Рекомендуемые действия, позволяющие избежать недействительного результата




1. При взятии анального мазка избегайте обильного количества фекалий

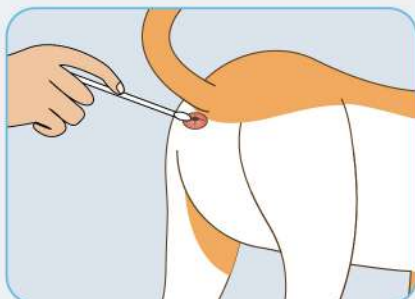

Если испражнений много, сломайте тампон и соскребайте испражнения до тех пор, пока на тампоне не останется фекальных частиц.



2. Опустите тампон в Высвобождающий агент

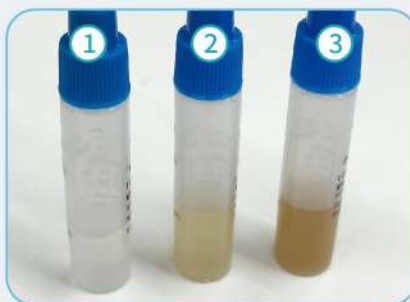

Примечание: ① Оригинал (Чистый) ② Приемлемый ③ Необходимо разбавить

Если цвет Высвобождающего агента такой же насыщенный, как у образца №3, приведенного выше, рекомендуется разбавить образец Высвобождающим агентом не менее чем в 10 раз (добавить 4-5 капель), прежде чем приступить к тестированию. Следующим образом:

